

Circuito de los medicamentos y DM | Surtido preparación del medicamento

TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

El triturador de pastillas Tookan® permite triturar los comprimidos hasta obtener un **polvo fino**. Está equipado con un asa que facilita la trituración de las pastillas sin esfuerzos y conviene así a todos.

Gracias a las bolsitas almacenables en el Tookan®, **ninguna pérdida ni contaminación** está posible con otros medicamentos. ¡ Se cumple entonces totalmente el higiene !



Manejable



Ergonómico



Higiénico



- De uso simple
- Materiales resistentes a los productos de desinfección del ámbito hospitalario
- Trituración sin esfuerzo
- Almacenamiento de las bolsitas en el triturador



SURTIDO PREPARACIÓN DEL MÉDICAMENTO

TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

- Base de chapa de acero con tratamiento epoxy
- Asa de poliamida
- Pieza de aluminio anodizado para triturar
- Ejes de inox

BOLSITAS PARA TRITURADOR

- Polietileno transparente de baja densidad
- Espesor : 180/200 µm
- Respetuoso del medio ambiente



Descripción

Dimensiones (en mm)

Referencia

Triturador manual de pastillas Tookan®

L. 265 x An. 75 x Alt. 90

NA00017

Lote de 1000 bolsitas para Tookan®

L. 50 x Alt. 120

NA00011.01

PROCESO DE USO



Tomar una bolsita en el compartimiento del triturador.



Poner las pastillas en la bolsita de polietileno e introducir la bolsita en el triturador.



Apoyar con la mano después relajar.



Ahora, Ud puede tomar las pastillas convertidas en polvo.

Equipamientos adicionales

Ud puede ver nuestro folleto sobre el triturador eléctrico de pastillas Severo® así que nuestro cortador e triturador de bolsillo.