

Reduce tus cicatrices recientes y antiguas

<https://reeducacionsuelopelvico.com/xeragel/>

Xeragel™

Gel de silicona 100%
para el tratamiento de cicatrices



Descripción

Xeragel es un gel de silicona 100% transparente, diseñado convenientemente para aplicarse regularmente en cicatrices pequeñas. Perfecto para aplicarse discretamente en áreas donde las láminas de silicona serían visibles o de difícil aplicación.

Especialmente indicado para la prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides. Xeragel ayuda a reducir el tamaño, grosor, altura, y color de todos tipos de cicatrices, incluyendo cicatrices nuevas y viejas, cicatrices posquirúrgicas, las cicatrices hipertróficas y queloides, y otros tipos de cicatriz causada por una lesión, los traumatismos y quemaduras.

Composición

100% silicona



Beneficios

- Solución eficaz para cicatrices nuevas y antiguas.
- Transparente.
- Xeragel es altamente eficaz para usarse en cicatrices faciales que estén expuestas.
- La misma efectividad de las láminas Isimoderm scars pero en un conveniente gel diseñado para aplicarse en:

- Manos y brazos
- Cara
- Cuello
- Codos
- Pies y tobillos


Para una
cicatrización
óptima

Funcionamiento:

Las cicatrices necesitan un ambiente ideal para la curación, lo cual es logrado al tener el balance apropiado de humedad y la exposición máxima al oxígeno.

Xeragel® es un gel completamente encapsulado, que significa que cubre la zona de tratamiento de la cicatriz por completo para un tratamiento uniforme de la zona.

Aunque la zona de tratamiento esté cubierta, Xeragel® es semipermeable, permitiendo que el oxígeno entre mientras que mantiene el exceso de humedad afuera, el ambiente perfecto para la curación del tejido de la cicatriz.

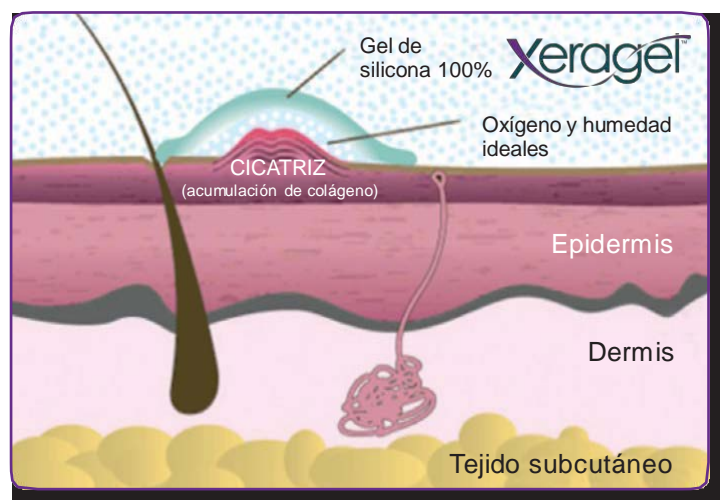

Tratamiento:

Una vez ha empezado la cicatrización y se han retirado los puntos, es cuando se ha de empezar a tratar. El método más eficaz para evitar una mala cicatrización es la utilización de los apósitos de silicona de grado médico o el gel Xeragel®. La utilización de estos evita la formación de cordones alrededor de las cicatrices.

El período óptimo para el tratamiento de reducción de la cicatriz es generalmente de 8 a 12 semanas.

El periodo óptimo de utilización del Xeragel es de 24 horas al día, retirando el Xeragel® cada 12 horas, limpiando la cicatriz y volviendo a aplicar el Xeragel®.

Xeragel® puede ser utilizado en cualquier cicatriz alternándolo con Isimoderm scars (lámina de silicona), usar durante el día Xeragel® e Isimoderm scars durante la noche.

Aprobaciones:

Xeragel® fabricado por Biodermis ha sido aprobado por el FDA de los Estados Unidos y C.E. de Europa.

Presentación:

Envase:

- Tubo de 10 g.

Expositor de sobremesa:

- Expositor de 6 unidades
- Expositor de 12 unidades

